

温風乾燥機能付

HAKUSUI

ミーレ ジェットウォッシャー G7891

ミーレ ジェットウォッシャーに **New Face** 登場！

温風乾燥機能付  だから

スツキリ / 洗浄、カラツ / と乾燥

そのまま滅菌器へ



Washer Disinfector G7891 with **Drying Plus**

Miele
PROFESSIONAL



洗浄・消毒の工程が終了した後、乾燥工程に入りますが『HEPAフィルター』を通した清潔な空気を使うので、内部が汚染されることはありません。




『HEPAフィルター』は簡単に交換することができます。

Washer Disinfector G7891 with Drying Plus



“ミーレは洗浄を高いレベルで標準化するクリーンで安全な、しかも経済的な洗浄装置です。”

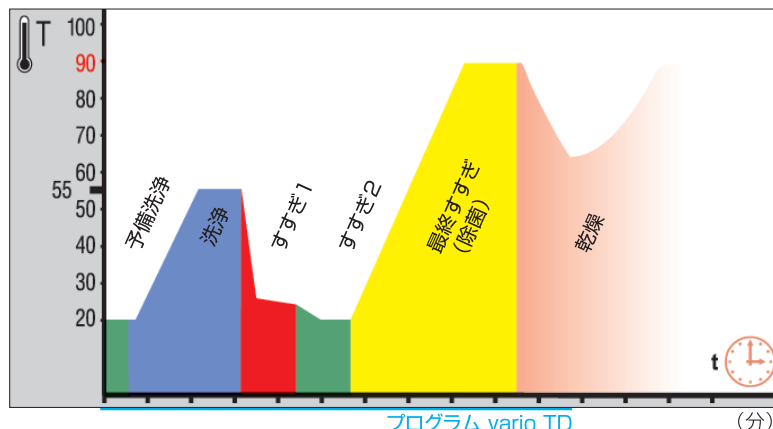

温風乾燥

洗浄プログラム終了後、温風乾燥を行います。HEPAフィルターを通した清潔な空気で乾燥するので、器具を汚染する事なく乾燥させます。ジェットウォッシャーから取り出した器具は乾燥しているので、そのまま滅菌する事ができます。

プログラム vario TD

洗浄から除菌まで連続して行うプログラムです。タンパク質は55°Cを超えると凝固してしまうので、この「vario TD」では最初に冷水で予備洗浄を行い、その後、洗剤を用いて本洗浄を行います。洗浄の後、すすぎを行います。最後のすすぎの時に水温を93°Cまで上げて5分間係留することで、除菌を行います。全ての器具についてこのプログラムが有効です。

プログラム UNIVERSAL III

汚れの程度が普通で血液汚れが少ない場合に、除菌なしで洗うだけのプログラムです。洗浄:60°C 最終すすぎ:65°C



専用粉末洗剤が使えます。

プログラム SPECIAL 93°C-10'

高温アルカリ洗浄に適したプログラムです。強アルカリの洗剤を使用した場合は中和剤が必要です。洗浄:93°C・10分(除菌) 最終すすぎ:75°C

プログラム A

洗浄温度やすすぎ温度などを自由に設定できるプログラムです。

温風乾燥機能付

ミーレ ジェットウォッシャー G7891



外形寸法: W600×D600×H850(820)mm
(H:天板付き850mm,天板なし820mm)
洗浄槽: W535×D500×H500mm
電源電圧: 3相 200V 50Hzまたは60Hz, 20A
給水: 3/4inch (20A) 1~8bar
排水: 2inch (50A) SGP
重量: 約70kg
循環ポンプ動力: 400L/分

Miele
PROFESSIONAL

医療機器製造販売届出番号 13B3X00018-000011

製造業者 Miele & Cie. KG
製造販売業者 ミーレ・ジャパン株式会社

販売業者 白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD 1F ☎(011)616-5814
〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル7F ☎(045)222-0381
〒464-0075 名古屋市中千種区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>